

EmbryoGen®

Для проведення запліднення і культивування ембріонів до стадії 2-8 бластомерів.
Може бути також використане для переносу ембріона

Даний продукт використовується в циклах лікування безпліддя як жіночої, так і чоловічої етіології. Продукт призначений для використання виключно професіоналами, що спеціалізуються в області ДРТ.

Містить:

Розчин альбуміну людини (HAS)
Рекомбінантний інсулін людини
Сарграмостим (GM-CSF) 2 нг/мл
Гентаміцину сульфат 10 мкг / мл

Контроль якості:

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)
Контроль осмоляльності (Ph.Eur., USP)
Контроль pH (Ph.Eur., USP)
Вміст ендотоксинів $\leq 0,1$ одиниць ендотоксину / мл (Ph.Eur., USP)
Аналіз вмісту HAS (Ph.Eur, USP)
Протестовано на мишачих ембріонах (MEA)

Примітка: Результати аналізу кожної партії наведені в Сертифікаті аналізу, представленому на www.origio.com.

Стабільність і правила зберігання

Продукти пройшли асептичну обробку і поставляються у стерильному вигляді.
Зберігати в оригінальній упаковці при 2-8 ° C, захищати від впливу світла.
Не заморожувати.

Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище.

Продукт слід використовувати протягом 7 днів після розкриття упаковки.

При зберіганні відповідно до вказівок виробника продукт зберігає стабільність аж до дати закінчення терміну придатності, яка зазначена на етикетці флакона.

Застереження і попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

1. Упаковка пошкоджена або порушена її цілісність.
2. Закінчився термін придатності.
3. Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

Обережно. Всі продукти – похідні крові-є потенційно інфекційними. Сировина, використана для виробництва даного продукту, пройшло відповідний контроль, який показав відсутність антигену вірусу гепатиту HbsAg і відсутність антитіл на

ВІЧ-1/-2, ВІЛ-1, віруси гепатиту В і С. Крім того, сировина була досліджена на парвовірус В19; встановлено відсутність цього вірусу. Жоден з відомих методів не може гарантувати відсутність переносу збудників інфекцій з препаратами на базі крові людини

Обережно: Даний препарат містить гентаміцин і не повинен застосовуватися до пацієнтів з виявленою алергією на гентаміцин або аналогічні антибіотики

Примітка: Необхідно забезпечити можливість контролю над такими препаратами. У цій сфері можуть існувати і національні нормативні вимоги вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються в поєднанні з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація виробів здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних виробів.

Інструкція

1. Перед використанням врівноважте EmbryoGen® протягом мінімум 2 годин в атмосфері з 5-6% CO₂ при 37 ° C.
2. Підготуйте ооцити як зазвичай і обробіть сперму відповідно до обраної процедури.
3. Проведіть запліднення (день 0) у попередньо врівноваженому EmbryoGen®. Якщо потрібне проведення процедури ICSI, то ін'єкцію сперматозоїдів проводять у попередньо врівноваженому середовищі для мікрomanipуляцій.
4. Через 16-20 годин (день 1) після запліднення (методом IVF або ICSI) переконайтесь у формуванні проядер, потім відмийте зиготи і перенесіть в свіжі мікрокраплі об'ємом 50 мкл EmbryoGen®, покритим Рідким Парафіном.

Перенесення ембріона на 3 день

1. Ембріони готуються і переносяться в матку попередньо врівноваженого середовища EmbryoGen® (наприклад в краплі 20 - 30 мкл)
2. Перед використанням промийте катетер середовищем EmbryoGen®.

ukr	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Продукт слід використовувати протягом 7 днів після розкриття упаковки	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена	Містить: розчин альбуміну людини
-----	---------	---	---	--	----------------------------------