

ICSI Cumulase®

Для видалення оточуючих ооцит кумулюсного комплексу і променистої корони в процесі підготовки до процедури ICSI.

Склад:

Розчин альбуміну людини (HAS)

Рекомбінантна гіалуронідаза людини (rHuPH20) 80 Е / мл

Контроль якості:

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)

Контроль осмоляльності (Ph.Eur., USP)

Контроль рН (Ph.Eur., USP)

Вміст ендотоксинів $\leq 0,1$ одиниць ендотоксину / мл (Ph.Eur., USP)

Аналіз вмісту HAS (Ph.Eur., USP)

Протестовано на мишачих ембріонах (MEA)

Ферментативна активність

Примітка: Результати аналізу кожної партії наведені в Сертифікаті аналізу, представленому на www.origio.com.

Стабільність і правила зберігання

Продукти пройшли асептичну обробку і поставляються у стерильному вигляді.

Зберігати в оригінальній упаковці при 2-8 ° С, захищати від впливу світла.

Не заморожувати.

Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище.

Продукт поставляється у флаконах, призначених для одноразового використання.

При зберіганні відповідно до вказівок виробника продукт зберігає стабільність аж до дати закінчення терміну придатності, яка зазначена на етикетці флакона.

Застереження і попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

1. Упаковка пошкоджена або порушена її цілісність.
2. Закінчився термін придатності.
3. Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

Обережно: Продукт призначений для одноразового використання і не повинен використовуватися повторно через ризик контамінації.

Обережно. Всі продукти – похідні крові-є потенційно інфекційними. Сировина, використана для виробництва даного продукту, пройшло відповідний контроль, який показав відсутність антигену вірусу гепатиту HbsAg і відсутність антитіл на ВІЧ-1/-2, ВІЛ-1, віруси гепатиту В і С. Крім того, сировина була досліджена на парвовірус В19; встановлено відсутність цього вірусу. Жоден з відомих методів не

може гарантувати відсутність переносу збудників інфекцій з препаратами на базі крові людини

Примітка: Необхідно забезпечити можливість контролю над такими препаратами. У цій сфері можуть існувати і національні нормативні вимоги вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються в поєднанні з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація виробів здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних виробів.

Примітки

Після отримання ооцитів рекомендується інкубувати їх у культуральному середовищі мінімум 2 години перед денудацією. ICSI Cumulase® містить буфер HEPES і має стабільним рН, тому може бути використана поза інкубатора без попереднього урівноваження. ICSI Cumulase® не містить бікарбонату, тому її не можна поміщати в інкубатор з CO₂, не замкнувши щільно кришкою.

Інструкція

1. Прогрійте ICSI Cumulase® до 37°C протягом 2 годин із закритою кришкою.
2. Наповніть одну лунку чотирьох-лункового планшета вмістом одного флакона ICSI Cumulase®, а три інші лунки – врівноваженим культуральним середовищем.
3. Помістіть один або кілька ооцит-кумулясних комплексів в лунку з ICSI Cumulase®. Через 60 секунд обережно піпетуйте ооцит-кумулясний комплекс до остаточної денудації.
4. Перенесіть ооцит (и) в лунку з культуральним середовищем.
5. Промийте ооцит (и), переносячи їх з лунки в лунку з чистим культуральним середовищем.
6. Перенесіть ооцит(и) в чашку для ICSI в окремі краплі, вкриті врівноваженим Рідким Парафіном.

Рекомендується на нетривалий час залишити ооцит (и) в культуральному середовищі, перш ніж приступати до процедури ICSI.

ukr	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена	Містить: розчин альбуміну людини
-----	---------	---	--	----------------------------------