

Інструкція з використання Мікропіпетки для ICSI (ICSI Micropipets)

Мікропіпетки для ICSI призначені для внутрішньоцитоплазматичної ін'єкції сперматозоїда в ооцит. Стандартні ICSI мікропіпетки виготовлені в трьох розмірах (50 - 8-9 μm , SI - 10-11 μm , 35 - 11-12 μm), мають скіс і вістря. Більші мікропіпетки ICSI використовуються для відбору й упорскування незрілої сперми. Ці мікропіпетки мають вістря й випускаються в 2 розмірах: 7-8 μm I.D. і 8-9 μm I.D. Мікропіпетки для ICSI мають зовнішній діаметр від 6 до 7 μm , внутрішній діаметр 4-5 μm і рівнем скосу 35 або 50 і коротким гострим наконечником або можуть бути без наконечника. Мікропіпетки можуть бути прямими або з кутом (15-45 °) на 0,5 мм від скосу. Мікропіпетки для ICSI виготовлені з боросілікатного скла, призначені для одноразового використання.

Настанова з використання:

Акуратно візьміть піпетку і переконайтеся перед використанням, що кінчик піпетки є незайманим.

1. Звільніть пломбу упаковки силіконового холдера, потягнувши за невеликий клапан на стороні. Потім оберніть їм холдер для того, щоб повністю звільнити його.
2. Оберніть силіконовий холдер, але не витягуйте його повністю з пробірки, поки із скла не з'явиться робоча поверхня. Потім повністю вийміть силіконовий холдер з пробірки.
3. Звільніть силіконовий наконечник від холдера.
4. Відокремте піпетку від холдера, акуратно зігнувши його так, щоб кінець піпетки звільнився і піднявся вгору. Не чіпайте верхівку піпетки.
5. Візьміть піпетку за кінець, що звільнився, і акуратно вийміть її з холдера.
6. Перед використанням візуально перевірте під мікроскопом верхівку піпетки, щоб переконатися в її цілісності.
7. Слідуйте індивідуальним рекомендаціям по веденню процедур мікроманіпуляцій, прийнятим у вашій лабораторії.

Мова наведення інформації – державна, українська.

Маркування містить назву виробу та наступну мінімально обов'язкову інформацію до нанесення:

Символ	Позначення	Приклад
—	Назва виробу	xxxxxx
	"Виробник"	ORIGIO Inc. 2400 Hunters Way, Charlottesville, Virginia, 22911, USA
	уповноважений представник	ПП «МЕДІТА»02091, м. Київ, вулиця Тростянецька, будинок 6-Б, квартира 81
	"Дата виготовлення"	20xx.xx.xx
	Не використовувати при пошкодженій упаковці	

	"Повторно використовувати заборонено"	
	"Використати до"	20xx.xx.xx
 партія	"Код партії"	123456
	"Ознайомлення з інструкціями до застосування"	
	Метод стерилізації під час якого використовують випромінювання STERILE, METHOD OF STERILIZATION	
 UA.TR.099	Знак відповідності технічним регламентам	