

Гнучкі стилети Wallace®
(Wallace® Malleable Stylet)

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Гнучкі стилети Wallace® представляють собою одноразові стерильні пристрої зі сліпим кінцем, призначені для використання разом з катетерами для перенесення ембріонів Wallace® у випадках утрудненого проходження через цервікальний канал.

У цих інструкціях міститься важлива інформація щодо безпечного застосування продукту. Перш ніж почати користуватися продуктом, ознайомтеся з інструкціями по застосуванню, включаючи застереження і попередження. Неналежне дотримання застережень, попереджень та інструкцій може призвести до смерті або серйозних травм пацієнта і (або) лікаря.

**ПРИМІТКА: ДАНИЙ ЛИСТОК-ВКЛАДИШ ПОВИНЕН БУТИ ПОШИРЕНИЙ
ВСЮДИ, ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОДУКТ**

Обережно!

- дані процедури можуть проводитися тільки особами, мають відповідну підготовку та знайомі з методами їх проведення. Перед проведенням даних процедур ознайомтеся з відповідної медичної літературою для отримання інформації про методах, ускладнень і можливих ризики.
- може використовувати лише кваліфікованим медичним персоналом (або під його контролем) відповідно до місцевого керівництва, що регулює процедуру екстракорпорального запліднення, якщо такі є.
- виріб підлягає утилізації в разі його пошкодження або порушення цілісності упаковки.

Опис

Ця інструкція відноситься до стерильних гнучких стилетів Wallace®, які мають такі коди виробів:

Довжина	Для використання з виробами	Код
18 см	1816, 1816S, TT1816, CE118, CE418	1816ST
23 см	1816N, TT1816N, 2316, CE123, CE423	1816NST

Показання до застосування

Для забезпечення жорсткості при використанні катетера для перенесення ембріонів Wallace®, якщо проходження через цервікальний канал утруднено.

Протипоказання

Катетер заборонено використовувати в наступних випадках:

- Хронічні інфекційні захворювання шийки матки
- Наявні або недавно перенесені запальні захворювання тазових органів

Інструкція по застосуванню

Помістіть пацієнта в положення на спині, лівому боці або у літотомічному положенні. Обнажіть шийку матки в дзеркалах і обережно очистіть її за допомогою ватного тампона, змоченого фізіологічним розчином або культивативним середовищем. Зафіксувавши павільйон катетера, просувайте гнучкий стилет через цервікальний канал до внутрішнього зіву.

ОБЕРЕЖНО!

Забороняється прикладати зусилля при відчутті опору всередині порожнини матки,

оскільки проштовхування катетера може привести до травмування ендометрію і кровотечі.

Не слід просувати зовнішню оболонку далі внутрішнього зіву і ні в якому разі не слід вводити її в порожнину матки, так як це може призвести до травмування ендометрію і кровотечі.

Внутрішній і зовнішній павільйони повинні бути зчеплені. Видалення стилета з зовнішньої оболонки до його остаточної установки може призвести до травмування ендометрію і кровотечі.

Якщо відчувається невеликий опір, витягніть катетер. Великим і вказівним пальцями зігніть гнучкий стилет з урахуванням анатомічних особливостей пацієнта і в такому положенні проведіть катетер до внутрішнього зіву.

Акуратно від'єднайте і видаліть внутрішній стилет, залишивши зовнішню оболонку на місці. Виконайте перенесення ембріона відповідно до інструкцій з використання катетера для перенесення ембріонів Wallace®.

Утилізуйте стилет відповідно до місцевих правил утилізації небезпечних медичних відходів. Інструкції, які описані вище, носять рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо способу використання даного обладнання приймається відповідальним лікарем.

Wallace, марка з дизайном Wallace і марка з дизайном Smiths Medical є торговими марками Smiths Medical. Символ ® означає, що торговельна марка зареєстрована у Відомстві по патентах і торгових марках США і в деяких інших країнах. Всі інші назви і марки, що згадуються в документі, є торговими назвами, торговельними марками або знаками обслуговування відповідних власників.

© 2014 Smiths Medical. Всі права захищені.

Одноразового використання.

Не застосовувати препарат повторно. Медичні пристрої вимагають специфічних характеристик матеріалу для виконання, як передбачалося. Ці характеристики були перевірені тільки для одного використання. Будь-яка спроба повторної обробки пристрою для подальшого повторного використання може негативно вплинути на цілісність пристрою або призвести до погіршення продуктивності. Пристрій стерильний, якщо контейнер не відкритий або не пошкоджений. Знищити після одноразового використання. Не піддавайте повторній стерилізації.

Символ	Позначення
	"Дата виготовлення"
	"Не використовувати при пошкодженій упаковці"
	"Повторно використовувати заборонено"
	"Використати до"
 партія	"Код партії"
	Номер з каталогу
 стерильно	Метод стерилізації під час якого використовують оксид етілену
	Не містить натуральний гумовий латекс
	Кількість
	Засторога! Ознайомитися із супровідними документами Увага, дивись інструкцію з використання
	Тримати подалі від сонячних променів
	Тримати сухим
	Виробник