

Інструкція для користувача

Катетери для внутрішньоматкової інсемінації (Artificial insemination catheters - INCA IUI)

Призначені для введення відмитих сперматозоїдів в порожнину матки при проведенні процедури внутрішньоматкової інсемінації.

Інструкція

1. Покладіть пацієнтку в гінекологічну позицію. Шийку матки необхідно експонувати за допомогою дзеркала-розширителя і злегка протерти ватою, змоченою в нормальному фізіологічному розчині або культуральному середовищі. При трансабдоминальному ультразвуковому обстеженні дотримуйтесь звичайних процедур для отримання оптимального зображення порожнини матки.

2. Перед використанням промийте катетер відповідним середовищем. При повністю натиснутому плунжері міцно прикріпіть шприц (переважно на 3 мл або на 5 мл) до внутрішнього катетера.

3. Втягніть в шприц 1 мл повітря і занурте дистальний кінець катетера в зразок відмитих сперматозоїдів так, щоб обидва латеральних кінця виявилися зануреними в рідину. Наберіть в катетер бажану кількість зразка.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

При проведенні внутрішньоматкової інсемінації завжди використовуйте відмиті сперматозоїди. Введення в матку невідмитих сперматозоїдів практично завжди викликає серйозні небажані реакції, аж до анафілактичного шоку. До початку виконання процедури см. Інформацію про методи підготовки сперматозоїдів для внутрішньоматкової інсемінації в медичній літературі.

4. Введіть катетер так, щоб внутрішній катетер пройшов через зовнішній і внутрішній отвори шийки в порожнину матки. При введенні катетера в шийного каналу може знадобитися легке згинання катетера. При проведенні ультрасонографії маніпулюйте зондом для отримання найкращого зображення внутрішнього катетера.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Катетер забороняється вводити в порожнину матки силою, долаючи відчутний спротив тканин, оскільки це може привести до пошкодження ендометрію і кровотечі. Катетер не слід вводити далі ніж на 1 см від дна порожнини матки, оскільки це може призвести до пошкодження ендометрію і кровотечі.

5. Якщо ви відчуваєте якийсь опір, витягніть катетер і за допомогою великого і вказівного пальців, зігніть IUI катетер, щоб він краще відповідав анатомії пацієнтки, після чого знову введіть в шийного каналу.

6. Розташуйте кінчик катетера приблизно в 1 см від дна порожнини матки і повільно введіть відмиті сперматозоїди і 1 мл повітря, щоб переконатися в повному введенні всього зразка. У разі сумнівів у повному введенні витягніть шприц з катетера і зарядіть його повітрям; потім знову підключіть шприц до катетера і виштовхніть за допомогою повітря всі залишки зразка.

7. Дайте внутрішньоматковому середовищу урівноважитися протягом деякого часу, після чого повільно витягніть катетер IUI.

8. Вилаліть дзеркала і дайте пацієнтці відпочити.

9. Утилізуйте катетер IUI відповідно до місцевих норм для небезпечних медичних відходів.