

Інструкція з використання

Мікропіпетки для допоміжного хетчинга (Assisted Hatching Micropipets)

Процедура допоміжного хетчинг зводиться до нанесення спеціальних насічок на оболонці ембріона, які допомагають його вивільненню з зовнішньої оболонки (zona pellucida) в разі її ущільнення. Один кінець мікропіпеток для допоміжного хетчинга витягнутий до стандартного зовнішнього діаметру 8-10 μm , якщо інакше не визначено, і має тупий отвір. На вимогу споживача піпетки можуть мати і інші розміри внутрішнього діаметру. Мікропіпетки для допоміжного хетчинга можуть бути прямими або мати кут ($15-45^\circ$) на 0,5 мм від конусовидного кінця. Мікропіпетки для допоміжного хетчинга виготовлені з боросілікатного скла, призначені для одноразового використання.

Настанова з використання:

Акуратно візьміть піпетку і переконайтеся, що кінчик піпетки є незайманим перед використанням.

1. Звільніть пломбу упаковки силіконового холдера, потягнувши за невеликий клапан на стороні. Потім оберніть їм холдер для того, щоб повністю звільнити його.
2. Оберніть силіконовий холдер, але не витягуйте його повністю з пробірки, поки із скла не з'явиться робоча поверхня. Потім повністю вийміть силіконовий холдер з пробірки.
3. Звільніть силіконовий наконечник від холдера.
4. Відокремте піпетку від холдера, акуратно зігнувши його так, щоб кінець піпетки звільнився і піднявся вгору. Не чіпайте верхівку піпетки.
5. Візьміть піпетку за кінець, що звільнився, і акуратно вийміть її з холдера.
6. Перед використанням візуально перевірте під мікроскопом верхівку піпетки, щоб переконатися в її цілісності
7. Слідуйте індивідуальним рекомендаціям по веденню процедур мікроманіпуляцій, прийнятим у вашій лабораторії.

Мікропіпетки для розтину зони (Zona Dissection Micropipets)

Мікропіпетки для розтину зони пеллюцида (zona pellucida) використовуються для проколу стінки ооцита в області зони пеллюцида для того, щоб забезпечити пункцію бластомера або допоміжний хетчинг ембріона. Ці мікропіпетки мають тупий кінець зі злегка відполірованим отвором і випускаються у двох розмірах: маленький 9-10 μm I.D. і великий 10-11 μm I.D. Стандартні мікропіпетки мають конічну форму і кут на відстані 0,5 мм від кінця.

Настанова з використання:

Акуратно візьміть піпетку і переконайтеся, що кінчик піпетки є незайманим перед використанням.

1. Звільніть пломбу упаковки силіконового холдера, потягнувши за невеликий клапан на стороні. Потім оберніть їм холдер для того, щоб повністю звільнити його.
2. Оберніть силіконовий холдер, але не витягуйте його повністю з пробірки, поки із скла не з'явиться робоча поверхня. Потім повністю вийміть силіконовий холдер з пробірки.
3. Звільніть силіконовий наконечник від холдера.
4. Відокремте піпетку від холдера, акуратно зігнувши його так, щоб кінець піпетки звільнився і піднявся вгору. Не чіпайте верхівку піпетки.
5. Візьміть піпетку за кінець, що звільнився, і акуратно вийміть її з холдера.
6. Перед використанням візуально перевірте під мікроскопом верхівку піпетки, щоб переконатися в її цілісності
7. Слідуйте індивідуальним рекомендаціям по веденню процедур мікроманіпуляцій, прийнятим у вашій лабораторії.

Мова наведення інформації – державна, українська.

Маркування містить назву виробу та наступну мінімально обов'язкову інформацію до нанесення:

Символ	Позначення	Приклад
—	Назва виробу	xxxxxx
	"Виробник"	ORIGIO Inc. 2400 Hunters Way, Charlottesville, Virginia, 22911, USA
	уповноважений представник	ПП «МЕДІТА»02091, м. Київ, вулиця Тростянецька, будинок 6-Б, квартира 81
	"Дата виготовлення"	20xx.xx.xx
	Не використовувати при пошкодженій упаковці	
	"Повторно використовувати заборонено"	
	"Використати до"	20xx.xx.xx
	"Код партії"	123456

партія		
	"Ознайомлення з інструкціями до застосування"	
	Метод стерилізації під час якого використовують випромінювання STERILE, METHOD OF STERILIZATION	
 UA.TR.099	Знак відповідності технічним регламентам	