

Інструкція з використання

Піпетки Пастера для екстракорпорального запліднення.

Ці мікропіпетки призначені спеціально для процедур екстракорпорального запліднення і мають 2 стандартних розміри 14 см і 22,9 см. Одноразові піпетки Пастера вироблені з боросілікатного скла. Піпетки можуть бути 5³/₄” та 9” завдовжки. Три піпетки запаковані в стерильну індивідуальну упаковку, що тестується на цілісність та стерильність. Упаковані піпетки стерилізуються ще раз в сухожаровій шафі. Остаточні піпетки вкладаються в велику коробку по 30 упаковок, що містять по 3 піпетки.

Настанови з використання.

Піпетки Пастера зазвичай використовують в лабораторіях екстракорпорального запліднення з метою загального піпетування.

Зокрема:

1. перенесення культурального середовища, або іншої рідини з однієї ємкості в іншу;
2. перенесення клітин або ембріонів з однієї ємкості в іншу;
3. перенесення над полум'ям до тоншого кінця, може використовуватися для переносу клітин кумулюса з яйцеклітини до процедури екстракорпорального запліднення.

Кріопети Cryopette

Кріопети Cryopette® - це пристрій кріозбереження, що використовується для розміщення, заморожування за допомогою процедур вітрифікації і зберігання бластоцист. Кріопетт складається з полікарбонату кріосоломіни з силіконовою грушею. це

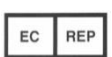
пристрій оптимізовано як замкнута система для процедур кріозбереження. Кріопетт упакований по 5 в лотку, по 4 лотка в коробці. Контроль якості Кріопетт стерилізується гамма опроміненням і перевіряється на відповідність рівню стерильності.

Настанови з використання.

- Зберігайте в чистому і сухому місці при кімнатній температурі (15°C - 300°C). Уникайте надмірних температур (> 40°C).
- Уважно огляньте кожен Кріопет при вилученні з упаковки.
- Не використовуйте Кріопет з ознаками пошкодження або нестерильності. кожен Кріопет призначений тільки для одноразового використання і не може бути використаний повторно.
- Після відкриття упаковки Cryopette® повинен бути використаний або увійти на сайт відходи.
- Використання Кріопет більше одного разу може призвести до контамінації зразка або його знаходження в трубці в неправильному положенні, що призводить до порушення процедури кріозбереження.

Мова наведення інформації – державна, українська.

Маркування містить назву виробу та наступну мінімально обов’язкову інформацію до нанесення:

Символ	Позначення	Приклад
—	Назва виробу	xxxxxx
	"Виробник"	ORIGIO Inc. 2400 Hunters Way, Charlottesville, Virginia, 22911, USA
	уповноважений представник	ПП «МЕДИТА»02091, м. Київ, вулиця Тростянецька, будинок 6-Б, квартира 81
	"Дата виготовлення"	20xx.xx.xx
	Не використовувати при пошкодженій упаковці	
	"Повторно використовувати заборонено"	
	"Використати до"	20xx.xx.xx
 партія	"Код партії"	123456
	"Ознайомлення з інструкціями до застосування"	
	Метод стерилізації під час якого використовують випромінювання STERILE, METHOD OF STERILIZATION	
 UA.TR.099	Знак відповідності технічним регламентам	