

Sage® 1-Step™

Для проведення in vitro запліднення та культивуації людських гамет та ембріонів від запліднення до 5-6 дня розвитку. Також середовище можна використовувати для перенесення ембріона.

Даний продукт використовується в циклах лікування безпліддя як жіночої, так і чоловічої етіології. Продукт призначений для використання виключно професіоналами, що спеціалізуються в області ДРТ.

Продукти

6701 Sage® 1-Step™ з Розчином альбуміну людини (HAS)

Містить:

Розчин альбуміну людини (HAS)
Гентаміцину сульфат 10 мкг / мл

Контроль якості:

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)
Контроль осмоляльності (Ph.Eur., USP)
Контроль pH (Ph.Eur., USP)
Вміст ендотоксинів $\leq 0,1$ одиниць ендотоксину / мл (Ph.Eur., USP)
Аналіз вмісту HAS (Ph.Eur, USP)
Протестовано на мишачих ембріонах (MEA)

Примітка: Результати аналізу кожної партії наведені в Сертифікаті аналізу, представленому на www.origio.com.

Стабільність і правила зберігання

Продукти пройшли асептичну обробку і поставляються у стерильному вигляді.
Зберігати в оригінальній упаковці при 2-8 ° C, захищати від впливу світла.
Не заморожувати.

Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище.

Продукт слід використовувати протягом 7 днів після розкриття упаковки.

При зберіганні відповідно до вказівок виробника продукт зберігає стабільність аж до дати закінчення терміну придатності, яка зазначена на етикетці флакона.

Застереження і попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

1. Упаковка пошкоджена або порушена її цілісність.
2. Закінчився термін придатності.
3. Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

Обережно. Всі продукти – похідні крові-є потенційно інфекційними. Сировина, використана для виробництва даного продукту, пройшло відповідний контроль, який показав відсутність антигену вірусу гепатиту HbsAg і відсутність антитіл на ВІЧ-1/-2, ВІЛ-1, віруси гепатиту В і С. Крім того, сировина була досліджена на парвовірус В19; встановлено відсутність цього вірусу. Жоден з відомих методів не може гарантувати відсутність переносу збудників інфекцій з препаратами на базі крові людини

Обережно: Даний препарат містить гентаміцин і не повинен застосовуватися до пацієнтів з виявленою алергією на гентаміцин або аналогічні антибіотики

Примітка: Необхідно забезпечити можливість контролю над такими препаратами. У цій сфері можуть існувати і національні нормативні вимоги вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються в поєднанні з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація виробів здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних виробів.

Інструкція

1. Перед використанням врівноважте середовище протягом мінімум 2 годин в атмосфері з 5-6% CO₂ при 37°C. Рекомендується, щоб значення pH середовища вимірювалось згідно робочих умов лабораторії, а щоб рівень CO₂ виставлявся згідно необхідного pH для оптимального розвитку ембріона. Необхідний діапазон pH для Sage® 1-Step™ становить $7,3 \pm 0,1$.
2. Після запліднення перенесіть зиготи у свіже попередньо врівноважене Sage® 1-Step™ і поверніть чашку в інкубатор.
3. Sage® 1-Step™ спеціально розроблений для безперервного культивування без зміни середовища до досягнення необхідної стадії розвитку ембріона.

Перенесення ембріона

1. Ембріони готуються і переносять в матку в попередньо врівноваженому середовищі Sage® 1-Step™.
2. Перед використанням промийте катетер Sage® 1-Step™.

ukr	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Продукт слід використовувати протягом 7 днів після розкриття упаковки	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена	Містить: розчин альбуміну людини
-----	---------	---	---	--	----------------------------------