

SynVibro® Hyadase

Для видалення оточуючих ооцит кумулюсного комплексу і променистої корони в процесі підготовки до процедури ICSI.

Склад:

Рекомбінантний інсулін людини

Pharmaceutical grade hyaluronidase, 80 МО/мл (не тваринного походження)

Контроль якості:

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)

Контроль осмоляльності (Ph.Eur., USP)

Контроль pH (Ph.Eur., USP)

Протестовано на мишачих ембріонах (MEA)

Обережно: Продукт призначений для одноразового використання і не повинен використовуватися повторно через ризик контамінації

Примітка: Результати аналізу кожної партії наведені в Сертифікаті аналізу, представленому на www.origio.com.

Стабільність і правила зберігання

Продукти пройшли асептичну обробку і поставляються у стерильному вигляді.

Зберігати в оригінальній упаковці при 2-8 ° С, захищати від впливу світла.

Не заморожувати.

Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище.

Продукт поставляється у флаконах, призначених для одноразового використання.

При зберіганні відповідно до вказівок виробника продукт зберігає стабільність аж до дати закінчення терміну придатності, яка зазначена на етикетці флакона.

Застереження і попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

1. Упаковка пошкоджена або порушена її цілісність.
2. Закінчився термін придатності.

Не використовувати повторно

Примітки

Після отримання ооцитів рекомендується інкубувати їх у культуральному середовищі мінімум 2 години перед денудацією

Інструкція

1. Прогрійте SynVibro® Hyadase до 37°C протягом 2 годин із закритою кришкою.

2. Наповніть одну лунку чотирьох-лункового планшета вмістом одного флакона SynVibro® Hyadase (0,5 мл), а три інші лунки – врівноваженим культуральним середовищем.
 3. Помістіть один або кілька ооцит-кумулюсних комплексів в лунку з SynVibro® Hyadase. Через 10 секунд обережно піпетуйте ооцит-кумулюсний комплекс піпеткою для денудації.
 4. Перенесіть ооцит (и) в лунку з культуральним середовищем й проведіть остаточну денудацію.
 5. Промийте ооцит (и), переносячи їх з лунки в лунку з чистим культуральним середовищем.
 6. Перенесіть ооцит(и) в чашку для ICSI в окремі краплі, вкриті врівноваженим Liquid Paraffin.
- Рекомендується на нетривалий час залишити ооцит (и) в культуральному середовищі, перш ніж приступати до процедури ICSI.*

ukr	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
-----	---------	---	--