

SynVidro®Flush

Для вилучення, промивання і мікроманіпуляцій з ооцитами

Даний продукт використовується в циклах лікування безпліддя як жіночої, так і чоловічої етіології. Продукт призначений для використання виключно професіоналами, що спеціалізуються в області ДРТ.

Продукти

1584 SynVidro ® Flush

1576 SynVidro ® Flush з 10 МО / мл гепарину

Містить:

Гепарин 10 МО / мл (не продукт № 1584)

Рекомбінантний інсулін людини

Контроль якості:

Контроль стерильності (Ph.Eur., USP)

Контроль осмоляльності (Ph.Eur., USP)

Контроль pH (Ph.Eur., USP)

Вміст ендотоксинів $\leq 0,1$ одиниць ендотоксину / мл (Ph.Eur., USP)

Протестовано на мишачих ембріонах (MEA)

Примітка: Результати аналізу кожної партії наведені в Сертифікаті аналізу, представленому на www.origio.com.

Стабільність і правила зберігання

Продукти пройшли асептичну обробку і поставляються у стерильному вигляді.

Зберігати в оригінальній упаковці при 2-8 ° C, захищати від впливу світла.

Не заморожувати.

Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище.

Продукт поставляється у флаконах, призначених для одноразового використання.

При зберіганні відповідно до вказівок виробника продукт зберігає стабільність аж до дати закінчення терміну придатності, яка зазначена на етикетці флакона.

Застереження і попередження

Не використовуйте продукт, якщо:

1. Упаковка пошкоджена або порушена її цілісність.
2. Закінчився термін придатності.
3. Середовище стало безбарвним, каламутним або має ознаки мікробної контамінації.

Обережно: Продукт призначений для одноразового використання і не повинен використовуватися повторно через ризик контамінації .

Обережно! Ооцити in vitro надзвичайно чутливі до змін pH і короткочасного охолодження. Невеликі коливання температури можуть викликати розрив мейотичного веретена і призвести до дисперсії хромосом.

Примітка: Під час попереднього прогрівання кришка флакона повинна бути міцно закрита.

Примітка: Необхідно забезпечити можливість контролю над такими препаратами. У цій сфері можуть існувати і національні нормативні вимоги вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються в поєднанні з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація виробів здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних виробів.

Інструкція

1. Прогрійте SynVitro®Flush до 37°C.
2. Тримайте SynVitro® Flush при 37°C в нагрівальному блоці впродовж всього процесу отримання ооцита і його транспортування в ембріологічну лабораторію.
3. Шприци для промивання фолікулів, заповніть середовищем SynVitro®Flush та проведіть аспірацію фолікулярної рідини і промийте фолікул обсягом середовища, еквівалентним обсягу зібраної фолікулярної рідини. Уникайте розтягування фолікула до обсягу, що перевищує початковий
4. Промийте ооцити середовищем SynVitro®Flush або попередньо врівноваженим культуральним середовищем, стежачи за тим, щоб видалити всі згустки крові і клітини гранульози
5. Перенесіть ооцити в попередньо врівноважене культуральне середовище і зберігайте при температурі 37 ° C в атмосфері 5-6% CO₂

ukr	Символи	Після нагрівання необхідно злити невикористане середовище	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
-----	---------	---	--